

产品用户手册

SLEEPON



快速使用指南

重要声明

小白睡眠仪是基于科学原理和对人类生理及认知的研究，但它并不是一种医疗设备。在考虑将小白睡眠仪的数据整合到您的健康活动中时，请咨询您的医生。

包装内容

小白睡眠仪	× 1
硅胶指环	× 3
充电器	× 1
USB线	× 1
产品用户手册	× 1

包装内容




小白睡眠仪



充电器



用户手册

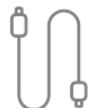

USB线



硅胶指环-大号



硅胶指环-中号



硅胶指环-小号

配件介绍



第一步

选择合适的指环

取出小白睡眠仪，选择合适大小的硅胶指环(建议佩戴在中指或无名指上)，然后把小白睡眠仪放入硅胶指环中。



大号



中号




小号

第二步

将充电器连接到电源上


把USB线小头连接充电器，然后把USB线另一端连接到USB充电口。

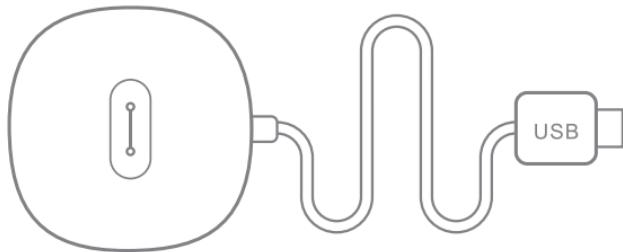

第三步

激活/给小白睡眠仪充电

首次使用小白睡眠仪时请将您的小白睡眠仪放在充电器上充电，如图所示。当led指示灯呈红色闪烁状态时，表明设备已成功激活并处于充电状态。一旦充满电，led指示灯就会由红色闪烁状态变为绿色长亮状态。

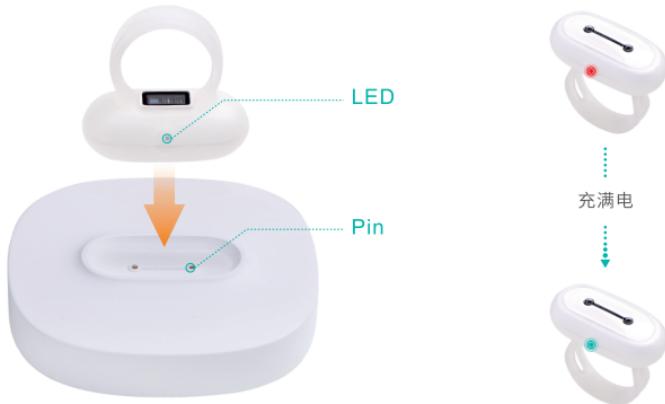


第四步

下载森林旁APP

安卓设备：在“应用宝”或“360手机助手”搜索“森林旁”，点击“安装”下载。

iOS设备：在苹果应用商店搜索“森林旁”，点击“安装”下载。

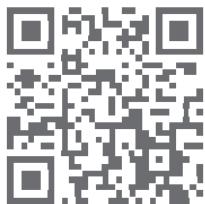

使用手机扫描二维码下载APP

第五步

连接小白睡眠仪

打开“森林旁”APP，点击“注册”根据提示输入个人信息以完成账户创建。

连接设备时，打开手机蓝牙—打开“森林旁”APP—登录账户—点击屏幕右下角“我的”选项卡—进入“我的设备”—点击“添加”，根据提示完成设备连接，连接成功后设备绿灯闪烁并震动。



森林旁

打开 app




连接

第六步

正确佩戴设备

如图所示，把设备戴在中指或无名指的手心一侧，设备检测到佩戴后会自主进入检测状态，传感器的灯将持续闪烁并伴随两次轻微震动。如果您佩戴后，没有感觉到震动，您可以轻轻握下拳头。

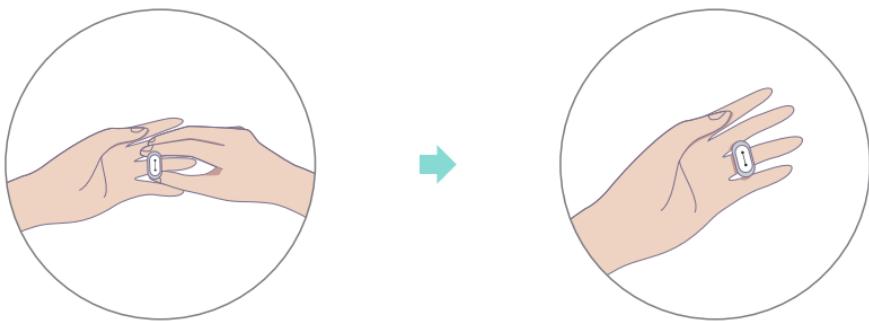

应用程序更新

森林旁应用程序正在定期进行更新，更新内容将确保您的体验更加舒适流畅。请确保你的手机系统处于最新版本，并且开启自动更新应用程序功能。我们将在新版本发布时通知您！

帮助

我们希望小白睡眠仪给您带来一个满意的使用体验。大多数问题很容易通过微信公众号或电子邮件解决，如果您有任何问题请您与我们的支持小组联系，我们的客户支持代表将竭诚为您提供帮助！

联系我们 : service@sleepon.cn

您可以关注我们的社交账户，我们将随时更新产品信息。



微信扫描
关注公众号

保修卡

小白家用睡眠仪三包凭证

小白家用睡眠仪售后服务承诺：严格依据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

- 1、自您签收日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由我们售后部门检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 2、自您签收日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由我们售后部门检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 3.自您签收日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列故障的情况，经由我们售后部门检测确定，可免费享受维修服务。

在三包有效期内，您可依照本规定享受修理、更换、退货的权利，退货应当凭发票办理。

非保修条例

- 1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 2、已超过三包有效期；
- 3、因不可抗力造成的损坏；
- 4、不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 5、因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

更多产品信息请查询网站：www.sleepon.cn。

产品性能 故障表	名称	产品性能故障
	产品主体	1. LED灯不亮 2. 蓝牙无法连接 3. 充电时LED灯不亮 4. 正确佩戴后,传感器灯不亮
	充电器	无法正常给本产品充电

SLEEPON

Better Sleep Better Life

www.sleepon.cn